

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT YASEE - MODEL : AC-303



YASEE

MÁY BẢO HÀNH VĨNH VIỄN
1 ĐỔI 1 NẾU LỖI TỪ NHÀ SẢN XUẤT

AUTO CODE

TÍNH NĂNG KỸ THUẬT



(M): BỘ NHỚ KẾT QUẢ
(S): CÀI ĐẶT

MADE IN CHINA

NHÀ SẢN XUẤT: YASEE BioMedical Inc.
No.9 Xiuyuan Road, High-tech industrial Development Zone, Qingdao, Shandong province, 266000, China

NK & PP: Công ty TNHH TM & DVKT Nguyễn Lâm
Đ/C: 107 Nguyễn Văn Công, P. Hạnh Thông, Tp. HCM
ĐCLH bảo hành: 142 Lê Sao, P. Phú Thạnh, Tp. HCM
ĐT: (028) 3949 1156 - 3949 1858 - 3949 1860
Web: www.nguyenlam.vn - Email: info@nguyenlam.vn

Đáng tin cậy - Tiện lợi
Là bạn đồng hành của người bệnh tiểu đường

Máy tự động nhận code que thử

Phương pháp đo: Cảm biến sinh học điện hóa

Enzyme FAD-GDH

Loại máu: Máu toàn phần mao mạch (người lớn)

Mẫu máu: 0.5 - 0.8 µl

Thời gian đo: 5s

Phạm vi đo: 20-600mg/dl (1.1-33.3 mmol/l)

Tuổi thọ pin: đo được 1000 lần


Bộ nhớ: lưu được 180 kết quả đo

Nhiệt độ thực hiện: 10°C-40°C (50-104°F)

Tự động tắt trong 3 phút (nếu ko sử dụng)

Nguồn điện: 1 pin Lithium 3V (CR2032)

CHỈ DÙNG VỚI QUE THỬ ĐƯỜNG HUYẾT AC-303

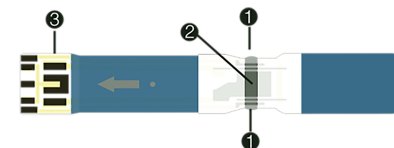

- (1) Cổng lấy mẫu: nhỏ máu vào mặt trên/dưới của que.
- (2) Detection Zone: đảm bảo phần đó được đổ đầy máu để đảm bảo kết quả chính xác.
- (3) Đầu điện cực: lắp đầu que thử vào máy đo.

CÁCH SỬ DỤNG BÚT LẤY MÁU

1. Tháo nắp điều chỉnh độ sâu kim Lancet
2. Cắm kim Lancet vào khe bút
3. Vận bỏ nắp bảo vệ kim Lancet.
4. Lắp lại nắp điều chỉnh độ sâu
5. Điều chỉnh độ sâu đâm kim (số càng lớn thì càng sâu)
6. Kéo núm điều khiển cuối bút lên cho đến khi nghe tiếng tách, sau đó thả ra.
7. Giữ chặt thiết bị ở cạnh ngón tay. Nhấn nút nhà kim Lancet
8. Cẩn thận tháo nắp điều chỉnh độ sâu kim Lancet
9. Đẩy nút thoát về phía trước để bỏ kim chích vào hộp đựng chống đâm thủng.
10. Lắp lại nắp điều chỉnh độ sâu

QUY TRÌNH ĐO ĐƯỜNG HUYẾT VỚI MÁY ĐO VÀ QUE THỬ ĐƯỜNG HUYẾT AC-303

- Bước 1:** Rửa tay sạch lau khô. Lấy que mới ra khỏi lọ. Đảm bảo đầy chặt nắp sau khi lấy que thử ra. Lắp que thử ngay vào khe cắm que thử như hình minh họa. Máy đo tự động bật.
- Bước 2:** Kiểm tra mã code trên máy đo đường huyết có trùng khớp với mã code trên lọ que thử mà bạn đang sử dụng không. Khi biểu tượng nhấp nháy, thì máy sẵn sàng.

- Bước 3 (lấy mẫu máu):** Gắn kim lancet vào bút, giữ chặt thiết bị vào bên cạnh ngón tay của bạn. Nhấn nút nhà. Nhẹ nhàng xoa bóp ngón tay của bạn để lấy được lượng máu cần thiết (xem hướng dẫn chi tiết dùng bút lấy máu bên trên).
- Bước 4:** Thêm mẫu máu vào mép phải hoặc trái của que thử. Đảm bảo rằng giọt máu đã đầy khe xác nhận que thử.

- Bước 5 (Đọc kết quả):** Kết quả của bạn sẽ hiển thị trong 5 giây.
- Cách quy đổi đơn vị đo chỉ số đường huyết:
 $1 \text{ mg/dl} = 1 \text{ mmol/l} \times 18$
 $1 \text{ mmol/l} = 1 \text{ mg/dl} : 18$

- Bước 6:** Tháo bỏ que thử ra khỏi máy đo. Vứt bỏ que thử và kim lancet một cách an toàn trong hộp đựng chống đâm thủng.
- Lưu ý: Máy đo có chức năng chỉ báo rủi ro.**
 - Nếu hiển thị **"Keto"** kết quả đường huyết của bạn có thể cao hơn 320 mg/dL (17,8 mmol/L).
 - Nếu hiển thị **"HYPO"** kết quả đường huyết của bạn có thể thấp hơn 70 mg/dL (3,9 mmol/L).
- Phạm vi kiểm tra của máy đo là từ 20 đến 600 mg/dL (1,1-33,3 mmol/L).
 - Nếu hiển thị **"LO"**, kết quả đường huyết của bạn có thể thấp hơn 20 mg/dL (1,1 mmol/L).
 - Nếu hiển thị **"HI"**, kết quả đường huyết của bạn có thể cao hơn 600 mg/dL (33,3 mmol/L).